


# VITA Easyshade®



**VITA**

## Toma del color VITA y comunicación del color VITA

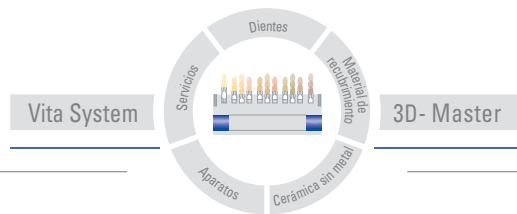

### Es así de fácil:

1. Limpiar los dientes
2. Colocar la sonda de medición en el diente
3. Pulsar el interruptor de la pieza de mano
4. Hacer la lectura del color del diente
5. Verificar el color con la guía de colores Toothguide
6. Añadir una fotografía digital a la ficha de laboratorio
7. Su toma de color ha terminado

### El sistema que lo pone todo claro

Gracias a la técnica innovadora de VITA, la toma de color en los dientes humanos con sus características individuales se ha vuelto mucho más fácil, segura y rápida. Los colores de dientes exactos con VITA Easyshade se basan en el SISTEMA VITA 3-D

MASTER, creando así las condiciones para obtener unos resultados perfectos. El VITA Easyshade ofrece la más alta seguridad gracias a la utilización de varios espectrofotómetros que permiten la máxima precisión incluso con diferentes ángulos de colocación. Asimismo, cada medición se realiza de forma completamente independiente de las condiciones de luz al medir. Son ventajas que suponen un gran beneficio para el paciente.

## Después de la reproducción del color VITA, el control del color VITA



### El control del color es así de fácil:

1. Seleccionar el color en el menú Restauración
2. Colocar la sonda en la restauración (grosor 0.8 mm. como mínimo)
3. Pulsar el interruptor de la pieza de mano
4. Hacer la lectura del resultado

5. El control confirma su medición

**Manejo extremadamente sencillo:** una visualización clara y legible en pantalla táctil, en un aparato móvil y ligero. Una punta fina y curvada que alcanza todos los dientes. **Resultados objetivos:** independientemente de la iluminación y del usuario. **Rentabilidad y eficacia:** requiere un período breve de adaptación. La toma del color se convierte en una tarea delegable. Ahorro de tiempo que se

refleja en los gastos. **Alta exactitud de medición** gracias a la medición espectrofotométrica. **Las ventajas acreditadas** del SISTEMA VITA 3D-MASTER: calidad para el laboratorio, estandarización, reproducibilidad, rapidez y seguridad. **Colores de dientes:** 26 colores del SISTEMA VITA 3D-MASTER, 3 colores de blanqueado del SISTEMA VITA 3D-MASTER y los 16 colores clásicos de VITAPAN.

# El sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER®

El extraordinario sistema VITA 3D-MASTER® permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.


1421ESP - 1106 (3.) SI

Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

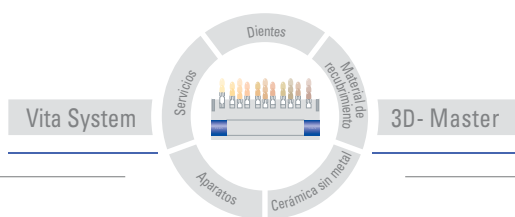

## VITA

Nuestros productos fueron desarrollados para su uso en el sector dental y deben utilizarse según las indicaciones. Las ilustraciones y los datos no contienen ninguna garantía de propiedades y no son vinculantes.

Publicación de estas instrucciones de uso: 11/06

VITA Zahnfabrik  
H. Rauter GmbH & Co.KG  
Postfach 1338  
D-79704 Bad Säckingen  
Tel. +49/7761/562-0  
Fax +49/7761/562-299  
Línea de atención permanente: +49/7761/562-222  
Fax +49/7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)  
[info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)